



El agua más pura para
todos los sistemas



Tratamiento del agua de nueva generación

Aproveche ahora las numerosas ventajas que le ofrece la instalación de su nuevo sistema de depuración de agua Multidem de W&H.



Multidem ofrece un agua desmineralizada de gran calidad para la generación de vapor en las autoclaves. Con ello se garantiza un rendimiento óptimo y homogéneo y la prolongación de la vida útil de su

esterilizador o equipo de depuración. Además, el dispositivo está equipado con una pistola de pulverización especialmente idónea para la limpieza del instrumental antes de la esterilización.



Cartucho reciclable

Un manejo extremadamente fácil



1.

Para sustituir un cartucho gastado, abra el asa de cierre.



2.

Gire el asa de cierre hasta llegar al tope, pulse el botón de barrido para la descarga de la presión y quite el cabezal del filtro del cartucho gastado.



3.

Una vez retirada la tapa protectora, coloque verticalmente el cabezal del filtro en un nuevo cartucho. Ahora Multidem estará de nuevo plenamente operativo.

Compatible con todos los dispositivos

El sistema de tratamiento del agua también se puede utilizar en muchas de las autoclaves y equipos de tratamiento convencionales.



1. Conexión directa

Multidem permite conectarse directamente a la Lisa Completamente Automática y a todos los esterilizadores que se rellenan automáticamente.

2. Mediante una pieza de conexión

Con una pieza de conexión (SAT/Water-Supply-Kit) podrán conectarse las autoclaves Lisa, Lisa 300/500 y Lina al Multidem.

3. Relleno manual

El esterilizador Lisa MB, así como todos los esterilizadores que no se rellenan automáticamente podrán hacerlo con la ayuda de la pistola de pulverización.

* Válido para los dispositivos Lisa Fully Automatic a partir de la fecha de fabricación 04/2011

Principales Ventajas

Facilidad de uso

- > El cambio de cartucho se realiza de forma rápida y sin necesidad de herramientas
- > Es posible colocar los cartuchos sin fijación

Compatible

- > Se puede utilizar en las autoclaves y los equipos de purificación convencionales
- > Implementación flexible en combinación con la pistola de pulverización

Económico

- > No es necesaria una toma de corriente
- > Resina mejorada de intercambio iónico

Seguro

- > El agua pura cumple las recomendaciones y especificaciones pertinentes para el funcionamiento de los esterilizadores de vapor y para el tratamiento de los instrumentos
- > Una buena calidad del agua constante y sin depósitos de cal



Datos técnicos

Fig. representaciones simbólicas. El equipamiento auxiliar y el contenido de los accesorios no se incluyen en el volumen del suministro.

	Multidem C17	Multidem C27
Presión de servicio:	2 bar – máx. 8,6 bar	
Temperatura de entrada del agua:	4 – 30 °C / 40 – 86 °F	
Caudal nominal:	60 l/h	
Calidad de salida del agua:	desmineralizada (EN 13060)	
Calidad de entrada del agua:	Agua potable	
Peso:	1,7 kg	2,7 kg
Anchura/Profundidad/Altura:	117/108/421 mm	124/123/476 mm
Posición de funcionamiento:	vertical	
Longitudes del tubo flexible:	2 x 3 m	
Válvula de seguridad:	sí	
Bloqueo de reflujo:	EB	

Volumen de suministro Multidem C17

Cabezal del filtro
cartucho con 1,7 kg
tubos flexibles y conexiones
(incl. Water Block®)

Volumen de suministro Multidem C27

Cabezal del filtro
cartucho con 2,7 kg
tubos flexibles y conexiones
(incl. Water Block®)



Pistola de pulverización opcional

Pistola de pulverización
tubos flexibles y conexiones

Cuando estén los equipos desconectados, tenga en cuenta que el seguro correspondiente para evitar reflujos cumpla las directrices, normas e indicaciones específicas del país.

W&H Sterilization Srl.
 Via Bolgara, 2
 24060 Brusaporto (BG), Italy
 t + 39 035 66 63 000
 f + 39 035 50 96 988
 office.sterilization@wh.com
 wh.com